

MONDVERZORGING GEMIDDELDE MONDVERZORGINGSKIT



De buisjes en het volledige hulpmiddel moeten na 24-uursgebruik worden weggegooid tenzij is aangegeven dat dit direct na eenmalig gebruik moet gebeuren, zoals hierna vermeld.



Y-adapter

1 Poortadapter voor aansluiting op de uitzuigcontainer

Hiermee kunnen twee permanente leidingen worden aangesloten voor gesloten en open uitzuiging; opnieuw aansluiten is niet nodig.

⚠️ Moet niet aan handvat worden aangesloten; uitsluitend bestemd voor uitzuigcontainer.



Suctiehandvat

2 Handvat met uitzuigregeling

Moet worden aangesloten op de suctiebuis; met vast aanzetdeel (fingertip) is een adapter vereist.

⚠️ Belangrijkste component van de gehele kit • Basisdeel voor alle andere componenten • Niet voor eenmalig gebruik • Herhaald 24-uursgebruik



Suctiehelpmiddel (open)

3 Suctiehelpmiddel voor verwijdering van secreties uit de mondholte

Moet aan handvat worden aangesloten • Vast suctiehelpmiddel voor gerichte uitzuiging zonder dat het verdraaid raakt of oplot – de conische tip voorkomt dat het suctiehelpmiddel blijft kleven en vermindert het risico op letsel.

⚠️ Niet voor eenmalig gebruik! • Het reinigingsmechanisme maakt herhaald 24-uursgebruik mogelijk • Door de beschermhoes naar voren te schuiven kan de siliconen ring de secreties verwijderen en de suctiekatheter droog houden.



Suctiehelpmiddel (gesloten)

4 Suctietandenborstel voor mechanische gebitsreiniging

Moet aan handvat worden aangesloten • Zeer zachte borstel minimaliseert de kans op letsel • Frontale uitzuigopening

⚠️ Voor eenmalig gebruik! Weggoeien na gebruik.



Suctieswab

5 Suctieswab voor (abrasieve) reiniging van de mondholte

Moet aan handvat worden aangesloten • Voor verwijdering van vast materiaal (dood weefsel en korstjes) • Maakt gelijktijdige abrasieve reiniging en uitzuiging mogelijk.

⚠️ Voor eenmalig gebruik! Weggoeien na gebruik.



Swab-stick (dentaswab)

6 Dentaswab voor reiniging van de mondholte

Gebruik: vooraf reinigen, bevochtigen of incidentele snelle mondverzorging.

⚠️ Voor eenmalig gebruik! Weggoeien na gebruik.




Beker

7 Beker voor antiseptische oplossing

Moet worden gevuld met verse antiseptische oplossing.

STANDAARDISERING VAN MONDZORG STAPSGEWIJZE INSTRUCTIES

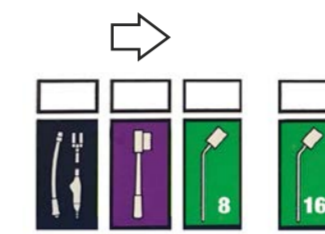

Mondzorg op vaste tijden.
Kit voor standaard mondverzorging om de 4 uur.
Eén scheidingsverpakking per procedure.

VROEGE DIENST



Starttijd

Blauwe verpakking - basisverpakking (suctiehandvat, suctiehelpmiddel, Y-adapter)

1. Bevestig het handvat aan de suctiebuis. Gebruik de adapter bij een vast aanzetdeel (fingertip).
 2. Bevestig het suctiehelpmiddel aan het handvat en schuif de beschermhoes naar achteren.
 3. Schakel de suctie in (wandschakelaar) en regel het uitzuigvermogen (handvat).
 4. Zuig de secreties uit de mondholte.
 5. Suctiehelpmiddel: schuif de beschermhoes naar voren en spoel de kathetertip.
- ⓘ De Y-adapter is alleen vereist bij constant gebruik van twee suctiebuisen.
- ⚠️ Suctiehandvat en suctiehelpmiddel zijn geschikt voor 24-uursgebruik. Niet weggooien na elk gebruik!



Paarse kit (suctietandenborstel, dentaswab, lege beker voor oplossing)

1. Gebruik het suctiehelpmiddel met handvat om secreties te verwijderen (zie instructies blauwe kit)
2. Vul de beker met verse antiseptische oplossing.
3. Gebruik de dentaswab om de mondholte vooraf te reinigen. Gebruik zo nodig meerdere dentaswabs.
4. Bevestig de suctietandenborstel aan het handvat.
5. Reinig het gebit. Gebruik tandpasta of een soortgelijke reinigungsoplossing.
6. Gebruik het suctiehelpmiddel zo nodig nog een keer.



+ 8 uur

Groene kit (suctieswab, dentaswab, lege beker voor oplossing)

1. Gebruik het suctiehelpmiddel (bevestig aan handvat – zie instructies blauwe kit)
2. Vul de beker met verse antiseptische oplossing.
3. Gebruik de dentaswab om de mondholte vooraf te reinigen. Gebruik zo nodig meerdere dentaswabs.
4. Bevestig de suctieswab aan het suctiehandvat en reinig de mondholte. Verwijder vast materiaal (dood weefsel en korstjes). Gebruik suctie voor het verwijderen.



LATE DIENST



+ 8 uur

Groene kit (suctieswab, dentaswab, lege beker voor oplossing)

Volg bovenstaande instructies.

¹Mondzorg moet worden uitgevoerd volgens een ziekenhuisprotocol. Voor eenmalig gebruik. Patiënten met veranderd bewustzijn of die opdrachten niet kunnen begrijpen, hebben mogelijk een bijbescherming nodig.