

# TRACHEAAL GESLOTEN UITZUIGSYSTEEM - RICHTLIJNEN

## TEKENEN DAT UITZUIGING NOODZAKELIJK IS:

- **BLAUWE LIPPEN/HUID ROND DE MOND**
- 


- **GORGELENDE, REUTELENDE,  
PIEPENDE GELUIDEN**
- 

- **GEÏRRITEERDE, RUSTELOZE, NERVEUZE  
PATIËNT**
- 

- **MOEIZAME ADEMHALING**
- 

- **ADEMSNELHEID HOGER DAN NORMAAL**
- 

- **IN GEVAL VAN BEADEMING KAN EEN  
HOGEDRUKALARM KLINKEN**

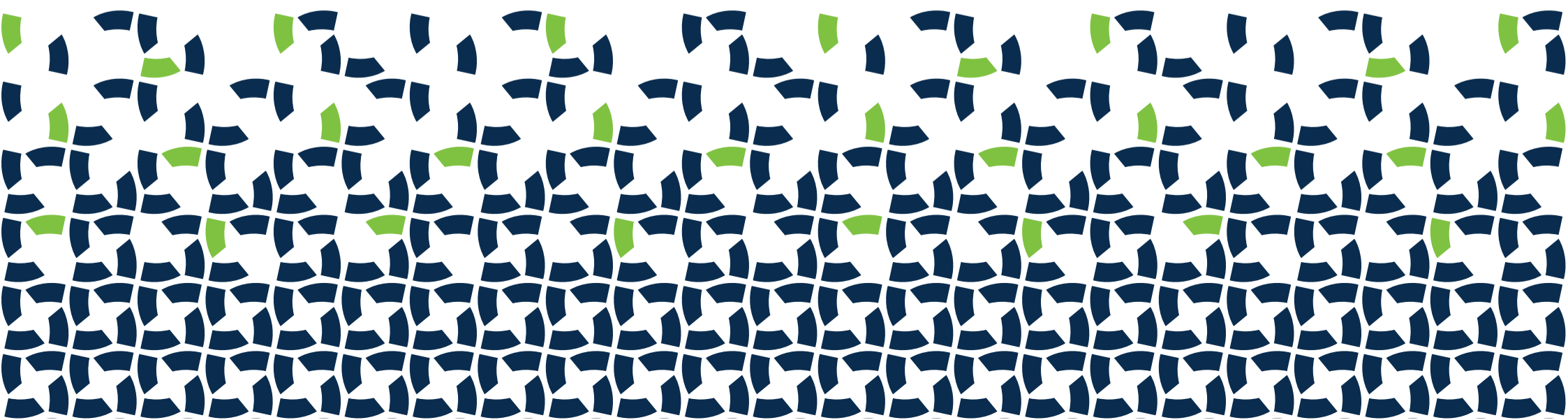

# HALYARD\* GESLOTEN UITZUIGSYSTEMEN

## Pediatrische tracheostomie

### 10 STAPPEN VOOR DE JUISTE UITZUIGING BIJ THUISPATIËNTEN

1 Was uw handen.

2 Open het **HALYARD\* gesloten uitzuigstelsel voor pediatrische tracheostomie**. Verwijder de dop.

3 Bevestig het duimventiel op de afzuigslang.

4 Controleer of de vacuümregelaar van het suctieapparaat op de gewenste stand staat.

5 Bevestig het gesloten uitzuigstelsel aan de tracheacanule en sluit de beademing opnieuw aan. Sluit de warmte- en vochtwisselaar (HME) of beademing opnieuw aan op het kniestuk van het gesloten uitzuigstelsel.







6 Pas de beademing zo nodig aan, conform de instructies van uw zorgverlener.

7 Ondersteun de kniestukverbinding en de tracheacanule met één hand. Voer de katheter langzaam in de luchtweg.

8 Breng de katheter in tot de lijn of het cijfer met de juiste kleur zichtbaar is in de connector. De uitzuigkatheter mag maar iets voorbij het einde van de tracheacanule gaan.

9 Uitzuiging door het duimventiel in te drukken. Ondersteun de tracheacanule en druk het ventiel gedurende 3 seconden in. Trek de katheter langzaam terug tot de zwarte tip zichtbaar is in de connector.

10 Spoel de katheter door en plaats de doppen terug tot het volgende gebruik.

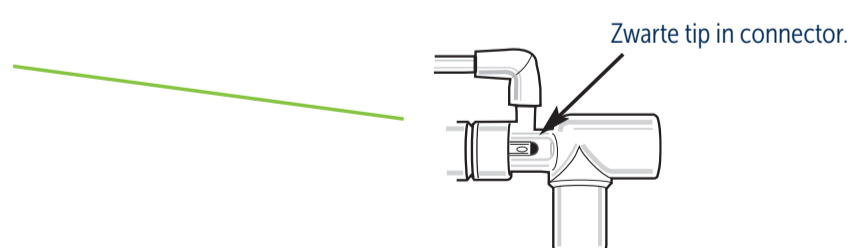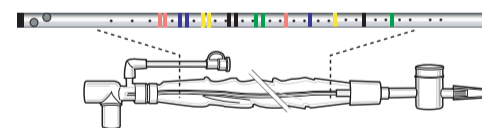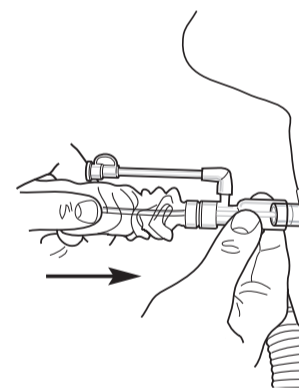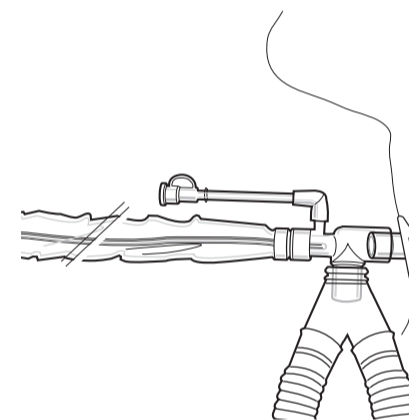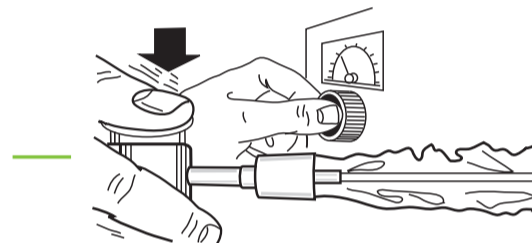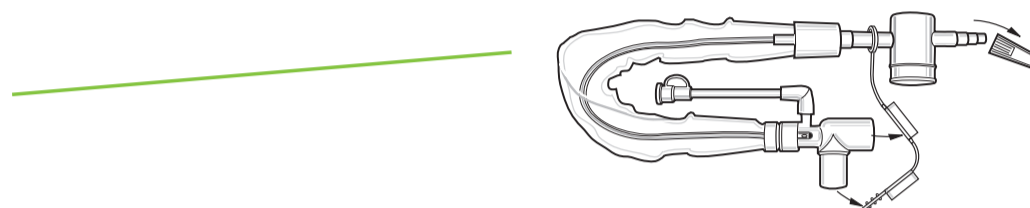

Herhaal zo nodig stap 7 t/m 9.  
Reinig en spoel het systeem door om infectie te voorkomen.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar [customerservice.bnl@hyh.com](mailto:customerservice.bnl@hyh.com) of ga naar [www.halyardhealth.nl](http://www.halyardhealth.nl)