

AVANOS* MICROCUFF*



SONDES D'INTUBATION TRACHÉALE PÉDIATRIQUES

1. Pour de l'aide à propos de la bonne sélection de la AVANOS MICROCUFF* consulter le tableau des tailles ci-dessous.**
2. Faire particulièrement attention, pendant le processus d'intubation, afin de s'assurer que le repère de profondeur d'intubation noir se trouve entre les cordes vocales.
3. Après l'intubation, il doit y avoir une fuite d'air audible à une pression des voies respiratoires ≤ 20 cm H₂O avec le brassard complètement dégonflé. Sinon, changer de sonde.
4. Gonfler le manchon à la pression d'étanchéité efficace mais pas supérieure à 20 cm H₂O de pression de manchon.

** Le tableau ci-dessous peut ne pas s'appliquer à un enfant connu pour avoir une anatomie ou des dimensions trachéales anormales.



DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE LA SONDE	POIDS OU ÂGE RECOMMANDÉS
3.0 MM	Terme \geq 3 kg jusqu'à < 8 mois
3.5 MM	8 mois à < 2 ans
4.0 MM	2 à < 4 ans
4.5 MM	4 à < 6 ans
5.0 MM	6 à < 8 ans
5.5 MM	8 à < 10 ans
6.0 MM	10 à < 12 ans
6.5 MM	12 à < 14 ans
7.0 MM	14 à < 16 ans

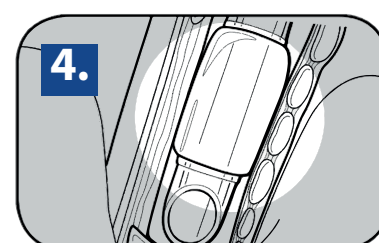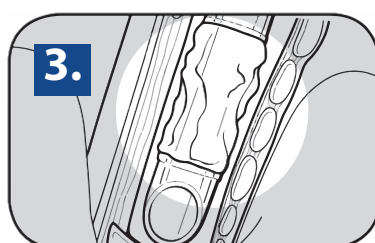

***Vous souhaitez plus d'informations de la Microcuff pédiatrique ?
Veuillez contacter l'équipe du service clientèle de MC Europe.
Elle se fera un plaisir de vous aider!***

 Flight Forum 1500, 5657 EZ Eindhoven

 +31 (0)85-487 21 21

 info@mc-europe.be