



AVANOS* MICROCUFF* ENDOTRACHEALE TUBES VOOR PEDIATRIE

1. Raadpleeg de AVANOS* MICROCUFF* maattabel voor tubes voor de selectie van de tube**.
2. Let er bij de intubatie speciaal op dat de zwarte dieptemarkering tussen de stembanden wordt geplaatst
3. Na de intubatie moet er een hoorbaar luchttek aanwezig zijn bij een luchtdruk van ≤ 20 cm H₂O en bij een volledig leeggelopen cuff. Zo niet, vervang de tube dan.
4. Vul de cuff tot de effectieve afdichtingsdruk. De cuffdruk mag echter niet meer bedragen dan 20 cm H₂O

** niet van toepassing bij kinderen waarvan bekend is dat zij een abnormale anatomie of maat trachea hebben




INWENDIGE DIAMETER VAN TUBE	LEEFTIJD/GEWICHT/JAAR/KG
3.0 MM	Bij geboorte > 3kg tot <8 mnd
3.5 MM	8 mnd tot < 2 jaar
4.0 MM	2 tot < 4 jaar
4.5 MM	4 tot < 6 jaar
5.0 MM	6 tot < 8 jaar
5.5 MM	8 tot < 10 jaar
6.0 MM	10 tot < 12 jaar
6.5 MM	12 tot < 14 jaar
7.0 MM	14 tot < 16 jaar

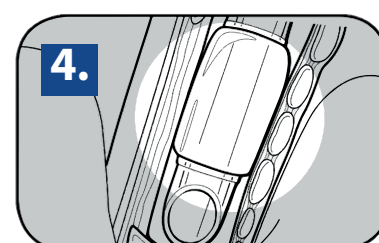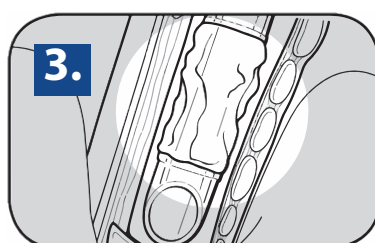

Wilt u meer informatie over de Microcuff Pediatric?
Neem contact op met het Customer Service Team
van MC Europe. Ze helpen u graag verder!

 Flight Forum 1500, 5657 EZ Eindhoven

 +31 (0)85-487 21 21

 info@mc-europe.be