




Face-Cradle®

Prone Support System

De Face Cradle is voor patiënten in buikligging waarbij men beter zicht heeft op het gezicht van de patiënt.



TIPS
Voor het draaien
van de patient in
buikligging met de
Face Cradle.

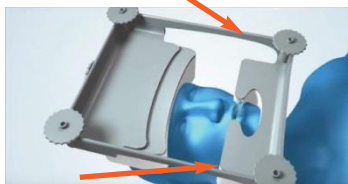

Terwijl de patiënt in rugligging ligt, plaatst u de basis van de Face Cradle, met foamkussens, op het gezicht van de patiënt. Zorg ervoor dat de wenkbrauwen zichtbaar zijn en de ET tube niet wordt afgeknikt. Controleer de diepte van de ET tube alvorens te gaan draaien. Houdt de Face Cradle met foamkussens goed tegen het gezicht van de patiënt terwijl u de patiënt draait.

De arts kan de beide zijanten van de basis van de Face Cradle gebruiken als handvaten tijdens het draaien van de patiënt.

Nadat u de patiënt in buikligging heeft gelegd controleert u de ET tube opnieuw. Plaats daarna de spiegel onder de basis van de Face Cradle in de 4 uitsparingen van de spiegel.

Stel de foamkussens in op de juiste grootte van het gezicht van de patiënt en bepaal de juiste hoogte voor Face Cradle zodat de patiënt in de juiste neutrale stand ligt. Indien nodig re-positioneer tevens het lichaam zodat de nek in de juiste neutrale stand komt. Sluit het beademingsslang aan op de ET tube.

Eenmaal in buikligging controleer nogmaals het gezicht en de foamkussens voor een juiste pasvorm. Zorg ervoor dat het gezicht en ogen zich tussen de foamkussens opening bevinden. Zorg er tevens voor dat er voldoende ruimte is tussen de neus en de spiegel. De ET tube en de beademingsslang moeten niet afgeknikt worden en dienen het zicht op de spiegel niet te belemmeren. Controleer regelmatig de ogen, neus en nek zodat deze in de juiste positie bevinden.

Waarschuwing:

1. Een niet natuurlijke houding van de nek kan leiden tot nekshade en / huidshade.
2. Om schaafwonden of decubitus te voorkomen, controleer het gezicht regelmatig en repositioneer het hoofd zoals in het protocol staat beschreven. De standaard klinische richtlijnen adviseren iedere 2 uur.

MercuryMedical®

**When Vision Matters...
You Have Control."**

U.S. Patents: US 8,549,683, B2; US D69