

POM® EZ-Lite HOGE CONCENTRATIE GEBRUIKSINSTRUCTIE

POM
Procedural Oxygen Mask

1001 series met non-rebreather O2 zak



Kies orale of nasale toegangsoptie. Duw vervolgens van binnenuit het masker een vinger door het EZ-scheurmembraan. Open de verbindingssranden van membraan volledig.



Kies hoge of medium concentratie

Steek de medium of hoge concentratie met non-rebreather adapter in de universele O2-poort op het masker. Zorg ervoor dat de non-rebreather adapter goed en volledig vast zit in het masker. Zorg ervoor dat de éénrichtingsklep of non-rebreather adapter goed functioneert.



Bevestig de universele O2 -lijn stevig aan een adapter met medium of hoge concentratie adapter.



Draai eerst de blauwe dop los. Bevestig vervolgens de [Luer-Lock] EtCO2 - samplinglijn stevig op het masker door middel van de EtCO2-adapterpoort met schroefdraad.



Zorg ervoor dat de universele O2 en EtCO2 samplinglijnen naar behoren functioneren.



ALLE POM™ SERIES BEVATTEN
EEN UNIVERSELE O2 ADAPTER

Roermondseweg 82, 6004 AT Weert

+31(0)495 452238

info@mc-europe.nl

www.mc-europe.nl