




AVANOS* MICROCUFF* ENDOTRACHEALE TUBES VOOR PEDIATRIE

- 1.** Raadpleeg de AVANOS* MICROCUFF* maattabel voor tubes voor de selectie van de tube**.
- 2.** Let er bij de intubatie speciaal op dat de zwarte dieptemarkering tussen de stembanden wordt geplaatst
- 3.** Na de intubatie moet er een hoorbaar luchttek aanwezig zijn bij een luchtdruk van ≤ 20 cm H₂O en bij een volledig leeggelopen cuff. Zo niet, vervang de tube dan.
- 4.** Vul de cuff tot de effectieve afdichtingsdruk. De cuffdruk mag echter niet meer bedragen dan 20 cm H₂O

** niet van toepassing bij kinderen waarvan bekend is dat zij een abnormale anatomie of maat trachea hebben



INWENDIGE DIAMETER VAN TUBE	LEEFTIJD/GEWICHT/JAAR/KG
3.0 MM	Bij geboorte > 3kg tot <8 mnd
3.5 MM	8 mnd tot < 2 jaar
4.0 MM	2 tot < 4 jaar
4.5 MM	4 tot < 6 jaar
5.0 MM	6 tot < 8 jaar
5.5 MM	8 tot < 10 jaar
6.0 MM	10 tot < 12 jaar
6.5 MM	12 tot < 14 jaar
7.0 MM	14 tot < 16 jaar

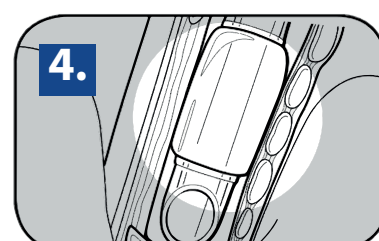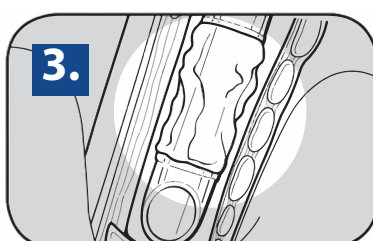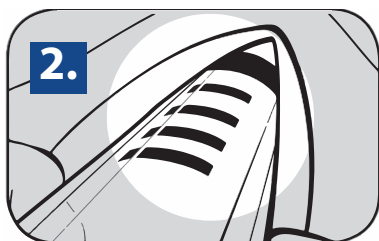

Wilt u meer informatie over de Microcuff Pediatric?
Neem contact op met het Customer Service Team
van MC Europe. Ze helpen u graag verder!

 Roermondseweg 82, 6004 AT Weert
 +31(0)495 452238
 info@mc-europe.nl