

AIR-Q[®]3

Hét larynxmasker voor
dagelijks gebruik



De geavanceerde, volledig-siliconen **Air-Q[®]3** helpt om veiligheid en vertrouwen in luchtwegmanagement te creëren, ongeacht welke luchtweguitdagingen je tegenkomt.

Ontworpen door artsen om de luchtwegen en de veiligheid van de patiënt te optimaliseren.

Vier varianten voor een reeks aan intubatie vereisten:

- **Air-Q®3** - Traditioneel larynxmasker voor dagelijks gebruik. Deze biedt opmerkelijk gemak bij het plaatsen van een endotracheale tube wanneer onverwachte intubatie nodig is.
- **Air-Q®sp3** - De self-pressurising cuff maakt gebruik van positieve druk beademing om de cuffdruk te reguleren. De cuff blaast automatisch op, met patient specifieke optimale druk, om een afsluiting te vormen.
- **Air-Q®3G** - Zelfde kenmerken als AirQ3 en voorzien van extra brede kanalen welke toegang geven tot de maag waarbij plaatsing van een maagsonde tot 18Fr mogelijk is.
- **Air-Q®sp3G** - De self-pressurising cuff maakt gebruik van positieve druk-beademing om de cuffdruk te reguleren. Het larynxmasker is voorzien van extra brede kanalen welke toegang geven tot de maag waarbij plaatsing van een maagsonde tot 18Fr mogelijk is.



Beschikbaar in de allerkleinste matjes!

Het AirQ3 larynxmasker is nu verkrijgbaar in de kleinste maten voor de de meest kwetsbare zuigelingen. De nieuwe maten 0 en 0.5 zijn verkrijgbaar in alle vier de AirQ3 varianten. De self-pressurising optie maakt inbrengen en ventilatie mogelijk zonder extra stappen. De gastric-access optie helpt bij secretie en lucht in de maag.



Maat 0 = < 2.0 kg & maat 0.5 = 2.0 – 4.0 kg

Epiglottis-lift


Onze unieke intuberende larynxmaskers beschikken over een epiglottis-lift met een verhoogde hiel om de plaatsing en afdichting van de luchtwegen te optimaliseren.



Luchtwegvergelijking



AIR-Q®3 MET EPIGLOTTIS-LIFT

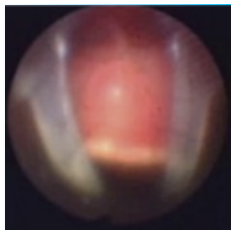

CONCURREEREND LARYNXMASKER (ILA)

Voordelen in het kort beschreven:

- Hét siliconen larynxmasker dat een luchtweg creëert
- Beschikbaar in 8 maten, waaronder de allerkleinste maten voor zuigelingen van 0 tot 2 kg
- Unieke Air-Q®3 epiglottis-lift
- Verkrijgbaar in vier varianten
- Met geïntegreerd bijtblok

AIR-Q®3 INTUBATEREND LARYNXMASKER MET 15 MM CONNECTOR

ITEM	DESCRIPTION	SIZE	IDEAL BODY WEIGHT	MAXIMUM OETT	MOUTH OPENING	LENGTH OF TUBE	MAXIMUM OG TUBE	INFLATION VOLUME
30005	Air-Q3	0	< 2.0 kg	3.0 mm	5 mm	6.0 cm	—	0 – 0.5 mL
30055	Air-Q3	0.5	2 – 4 kg	4.0 mm	8 mm	7.0 cm	—	0 – 0.5 mL
30105	Air-Q3	1.0	4 – 7 kg	4.5 mm	11.0 mm	9.0 cm	—	0.5 – 1.0 mL
30155	Air-Q3	1.5	7 – 17 kg	5.0 mm	14.0 mm	11.0 cm	—	1.0 mL
30205	Air-Q3	2	17 – 30 kg	5.5 mm	17.0 mm	14.0 cm	—	1.0 – 2.0 mL
30305	Air-Q3	3	30 – 60 kg	7.0 mm	20.0 mm	16.0 cm	—	2.0 – 3.0 mL
30405	Air-Q3	4	60 – 80 kg	8.0 mm	23.0 mm	18.0 cm	—	3.0 – 4.0 mL
30505	Air-Q3	5	> 80 kg	9.0 mm	25.0 mm	20.0 cm	—	4.0 – 5.0 mL
50005	Air-Q3G	0	< 2.0 kg	3.0 mm	5 mm	6.0 cm	6 Fr	0 – 0.5 mL
50055	Air-Q3G	0.5	2 – 4 kg	4.0 mm	8 mm	7.0 cm	6 Fr	0 – 0.5 mL
50105	Air-Q3G	1.0	4 – 7 kg	4.5 mm	11.0 mm	9.0 cm	8 Fr	0.5 – 1.0 mL
50155	Air-Q3G	1.5	7 – 17 kg	5.0 mm	14.0 mm	11.0 cm	10 Fr	1.0 mL
50205	Air-Q3G	2	17 – 30 kg	5.5 mm	17.0 mm	14.0 cm	12 Fr	1.0 – 2.0 mL
50305	Air-Q3G	3	30 – 60 kg	7.0 mm	20.0 mm	16.0 cm	16 Fr	2.0 – 3.0 mL
50405	Air-Q3G	4	60 – 80 kg	8.0 mm	23.0 mm	18.0 cm	18 Fr	3.0 – 4.0 mL
50505	Air-Q3G	5	> 80 kg	9.0 mm	25.0 mm	20.0 cm	18 Fr	4.0 – 5.0 mL
40005	Air-Qsp3	0	< 2.0 kg	3.0 mm	5 mm	6.0 cm	—	—
40055	Air-Qsp3	0.5	2 – 4 kg	4.0 mm	8 mm	7.0 cm	—	—
40105	Air-Qsp3	1.0	4 – 7 kg	4.5 mm	11.0 mm	9.0 cm	—	—
40155	Air-Qsp3	1.5	7 – 17 kg	5.0 mm	14.0 mm	11.0 cm	—	—
40205	Air-Qsp3	2	17 – 30 kg	5.5 mm	17.0 mm	14.0 cm	—	—
40305	Air-Qsp3	3	30 – 60 kg	7.0 mm	20.0 mm	16.0 cm	—	—
40405	Air-Qsp3	4	60 – 80 kg	8.0 mm	23.0 mm	18.0 cm	—	—
40505	Air-Qsp3	5	> 80 kg	9.0 mm	25.0 mm	20.0 cm	—	—
60005	Air-Qsp3G	0	< 2.0 kg	3.0 mm	5 mm	6.0 cm	6 Fr	—
60055	Air-Qsp3G	0.5	2 – 4 kg	4.0 mm	8 mm	7.0 cm	6 Fr	—
60105	Air-Qsp3G	1.0	4 – 7 kg	4.5 mm	11.0 mm	9.0 cm	8 Fr	—
60155	Air-Qsp3G	1.5	7 – 17 kg	5.0 mm	14.0 mm	11.0 cm	10 Fr	—
60205	Air-Qsp3G	2	17 – 30 kg	5.5 mm	17.0 mm	14.0 cm	12 Fr	—
60305	Air-Qsp3G	3	30 – 60 kg	7.0 mm	20.0 mm	16.0 cm	16 Fr	—
60405	Air-Qsp3G	4	60 – 80 kg	8.0 mm	23.0 mm	18.0 cm	18 Fr	—
60505	Air-Qsp3G	5	> 80 kg	9.0 mm	25.0 mm	20.0 cm	18 fr	—



Maat 0

Maat 0.5

Maat 1.0


Maat 1.5

Maat 2

Maat 3

Maat 4

Maat 5

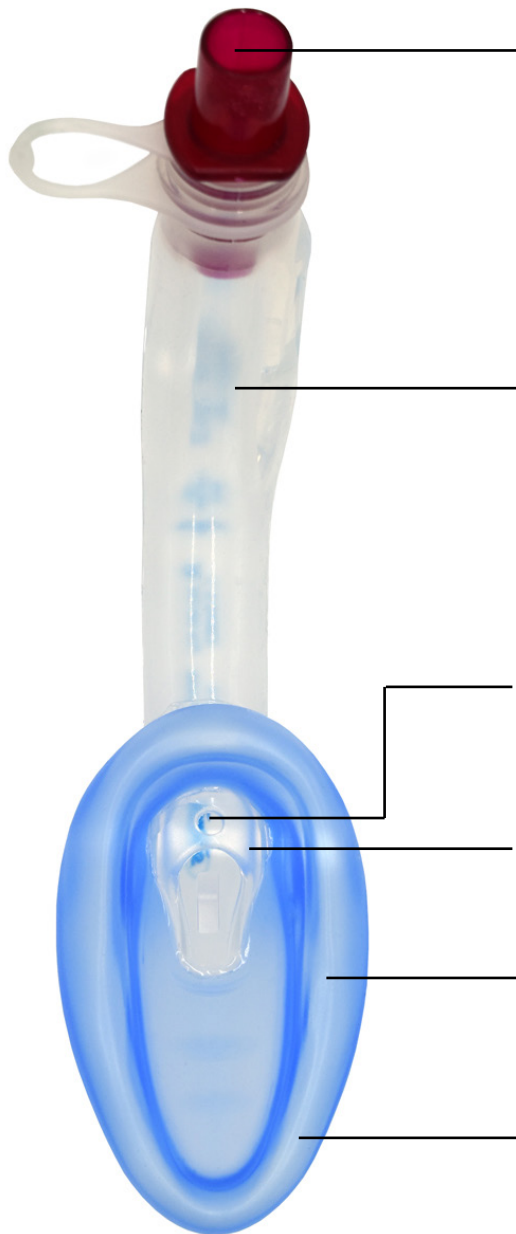

Kleur gecodeerde connector voor gemakkelijke maat identificatie. Verwijderbare, vastgemaakte connector maakt het inbrengen van de endotracheale tube door het larynxmasker mogelijk.

Anatomisch gebogen, medisch, siliconen luchtwegtube met geïntegreerd bijtblok.

Extra opening maakt overdracht van lucht mogelijk als de hoofdopening geblokkeerd raakt

Exclusieve epiglottis-lift tilt de epiglottis op om de plaatsing van de cuff te maximaliseren


Zachte siliconen cuff van medische kwaliteit

Self-pressurising cuffinflatie wordt geregeld door inademing/uitademing druk. Geen handmatige inflatie nodig.*


Air-Q®sp3

**Alleen bij Air-Qsp3 en Air-Qsp3G producten*

**Wilt u meer informatie of uw medewerkers kosteloos trainen?
Neem contact op met het Customer Service Team van
MC Europe. Ze helpen u graag verder!**

 Flight Forum 1500, 5657 EZ Eindhoven

 +31 (0)85-487 21 21

 info@mc-europe.be