



À propos

Lorsque des vies sont en jeu, vous avez besoin d'un système CPAP à la hauteur du défi. Flow-Safe II EZ® est un dispositif CPAP d'aide respiratoire pour les patients en ventilation spontanée, avec nébuliseur intégré nécessitant une seule source d'oxygène (débitmètre ou bouteille). Flow-Safe II EZ® vous donne un avantage en cas d'urgences respiratoires vitales.

Avantages

- Le personnel sanitaire peut appliquer une thérapie CPAP avec nébuliseur avec une seule source d'oxygène
- Une consommation en oxygène réduite de 50% par rapport aux modèles précédents
- Nébuliseur intégré
- Manomètre intégré et soupape de surpression (dans tous les modèles)
- Masque VNI oro-nasal de haute qualité



Le dispositif CPAP avec nébuliseur Flow-Safe II-EZ® permet de réduire la consommation en oxygène, tout en gardant une FIO_2 suffisamment élevée. Économise des ressources et représente un réel avantage lors des transfert long. Une augmentation du débit peut être nécessaire lors de l'activation du nébuliseur.

Manomètre intégré et soupape de surpression



Application Clinique

- Après connexion de la tubulure de raccordement Flow-Safe II-EZ® au débitmètre à oxygène (ou à la bouteille), démarrer d'abord en mode CPAP et adapter la pression per le débit d'oxygène.
- Avec le bouton d'activation en position rouge, le débit d'oxygène sera complètement utilisé en mode CPAP
- Avec le bouton d'activation en position vert, env. 6 l/min du débit d'oxygène sont déviés vers le nébuliseur
- Le tableau des débits/pression CPAP est disponible sur un autocollant jaune appliqué sur tous les dispositifs
- Pour obtenir la pression CPAP désirée, régler le débit d'oxygène du débitmètre (ou de la bouteille)
- Si le nébuliseur est activé, le débit devra être réglé pour obtenir la pression désirée

Mercury Medical®
Superior Solutions

Over 60 Years of Medical Device Sales and Development
Dedicated to delivering clinically differentiated critical care technology that saves lives throughout the world.

internationalcustomerservice@mercurymed.com
www.mercurymed.com