

FLOWSAFE II[®] +

Dispositif **Bilevel** CPAP à usage unique



Dispositif BILEVEL et CPAP à usage unique Deux-en-Un

Le dispositif d'aide respiratoire Flow-Safe II+[®] est le seul dispositif BILEVEL-CPAP à usage unique actuellement disponible. Sa légèreté et sa simplicité d'utilisation facilitent la prise en charge du patient en insuffisance respiratoire aigüe lorsqu'une VNI est indiquée. Tous les dispositifs Flow-Safe[®] incluent un manomètre intégré pour la vérification des pressions CPAP, IPAP et EPAP. Le dispositif Flow-Safe II+[®] est une solution idéale pour la prise en charge du patient en détresse respiratoire en ventilation spontanée, lorsque des dispositifs pour la VNI ne sont pas accessibles ou disponibles.

- Premier dispositif à usage unique permettant la transition du mode CPAP en mode BILEVEL par un simple bouton d'activation
- Pas d'accessoires à assembler : la IPAP est réglée per le débit, la EPAP est réglée par une molette de réglage
- Le manomètre intégré permet la vérification des pressions CPAP ou IPAP/EPAP (disponible sur tous les modèles)
- Léger (<300g) et facile à transporter
- Pas d'équipement supplémentaire requis, idéal pour la prise en charge en préhospitalier



FLOWSAFE II+®

Dispositif **Bilevel** CPAP à usage unique

Le fonctionnement du dispositif

Après connexion du dispositif BILEVEL-CPAP Flow-Safe® II+ au débitmètre (ou à la bouteille d'oxygène), appliquer d'abord une ventilation CPAP en sélectionnant le mode CPAP à l'aide du bouton d'activation vert. Le réglage du débit d'oxygène permettra d'ajuster la pression CPAP, ainsi que sa vérification par le manomètre intégré.



La molette bleue permet le réglage de la pression EPAP

Le bouton d'activation vert permet l'activation du mode CPAP ou BILEVEL

CONNECT TO FLOW SOURCE ONLY

FLOWSAFE II⁺

Disposable BiLevel CPAP System

Flow (LPM)

CPAP MODE (cm H₂O)

6

2.0 - 3.0

10

6.0 - 7.0

12

8.0 - 9.0

15

11.0 - 12.0

CAUTION: CPAP pressure will decrease when BiLevel is activated & increase when BiLevel is deactivated. Verify CPAP pressure with manometer & adjust flowmeter as needed.

CONNECT TO FLOW SOURCE ONLY

FLOWSAFE II⁺

Disposable BiLevel CPAP System

Flow (LPM)

BiLevel MODE (cm H₂O)

14

8 - 9

IPAP

15

9 - 10

IPAP

16

11 - 12

IPAP

17 (MAX)

12 - 13

IPAP

CAUTION: CPAP pressure will decrease when BiLevel is activated & increase when BiLevel is deactivated. Verify CPAP pressure with manometer & adjust flowmeter as needed.

Pour passer en mode BILEVEL, sélectionner BILEVEL à l'aide du bouton d'activation vert. La pression CPAP sera alors traduite en pression inspiratoire positive (IPAP), et la pression expiratoire (EPAP) pourra être réglée par la molette EPAP bleue.

Étude comparative entre le dispositif Flow-Safe® à usage unique et la ventilation non invasive classique



Selon une récente étude publiée dans la revue scientifique American Journal of Emergency Medicine au sujet de la prise en charge de l'insuffisance aigue pulmonaire cardiogénique (OAP), le dispositif CPAP à usage unique Flow-Safe® serait « aussi efficace que les dispositifs électroniques de ventilation non invasive (VNI) classiques pour l'amélioration de la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et les valeurs de gazométrie artérielle ». Les dispositifs Flow-Safe II, Flow-Safe II EZ et Flow-Safe II+ représentent une solution alternative efficace pour la prise en charge du patient en détresse respiratoire en ventilation spontanée, lorsque des dispositifs électroniques classiques pour la VNI ne sont pas accessibles ou disponibles.

INFORMATIONS DE COMMANDE

#10-57400	Flow-Safe II+ BiLevel CPAP, taille Adulte Grand 5/emballage Masque VNI oro-nasal, connecteur droit avec pivot et harnais de fixation
#10-57401	Flow-Safe II+ BiLevel CPAP, taille Adulte Moyen 5/emballage Masque VNI oro-nasal, connecteur droit avec pivot et harnais de fixation
#10-57402	Flow-Safe II+ BiLevel CPAP, taille Enfant Petit 5/emballage Masque VNI oro-nasal, connecteur droit avec pivot et harnais de fixation
#10-57403	Flow-Safe II+ BiLevel CPAP sans masque 5/emballage