

BEST PRACTICES

- Altijd spoelen na het uitzuigen
- Uitzuigkatheter elke 72 uur vervangen
- Verdeelstuk indien nodig vervangen (IVG)
- Roze flacon met zoutoplossing voor en na elke uitzuiging aansluiten
- Geen uitzuigkatheter of afsluitcassette gebruiken om het verdeelstuk te verplaatsen. In plaats daarvan de instelknop gebruiken om te sturen.





Het roterende verdeelstuk **KLIKT** vast in positie zodat het circuit gesloten blijft.

Medici kunnen uitzuigen en andere ingrepen uitvoeren, zoals bronchoalveolaire lavage, bronchoscopie, of MDI-geneesmiddeltoediening terwijl het gesloten beademingscircuit gehandhaafd blijft - een van de aanbevelingen om beademingsgerelateerde pneumonie (VAP) te voorkomen.

BEST PRACTICES

OPSTELLEN VAN HET GESLOTEN UITZUIGSYSTEEM

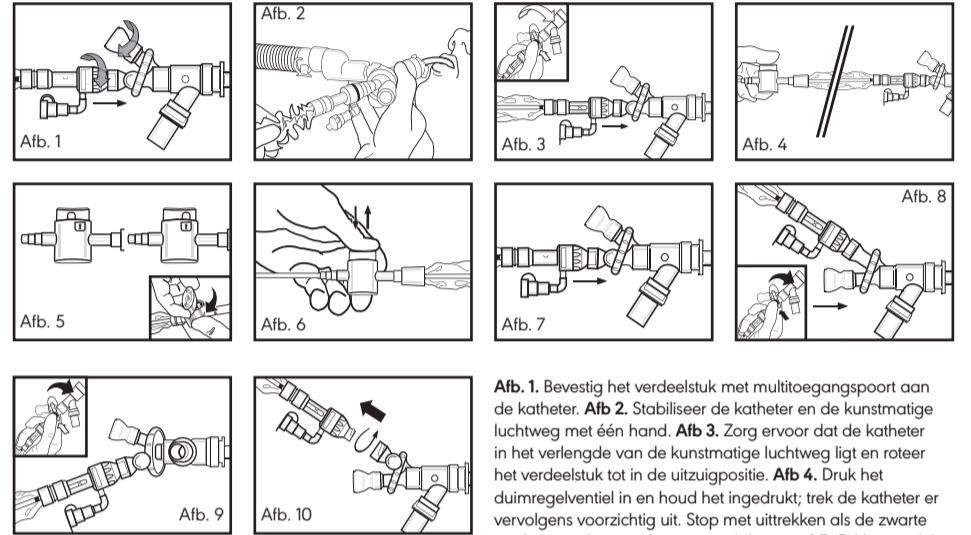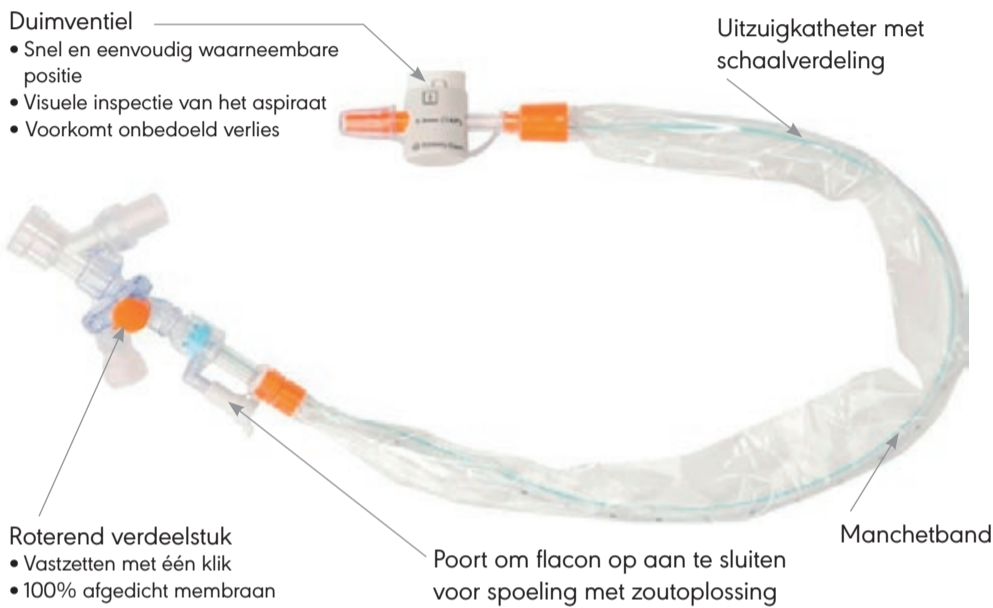

Afb. 1. Bevestig het verdeelstuk met multitoegangspoort aan de katheter. **Afb. 2.** Stabiliseer de katheter en de kunstmatige luchtweg met één hand. **Afb. 3.** Zorg ervoor dat de katheter in het verlengde van de kunstmatige luchtweg ligt en roteer het verdeelstuk tot in de uitzuigpositie. **Afb. 4.** Druk het duimregelventiel in en houd het ingedrukt; trek de katheter er vervolgens voorzichtig uit. Stop met uittrekken als de zwarte markering binnen de mouw zichtbaar is. **Afb. 5.** Vergrendel het duimregelventiel zo nodig als er niet wordt uitgezogen om onbedoelde of toevallige activering te voorkomen. **Afb. 6.** Druk het duimregelventiel met tussenpozen in en laat het weer los. **Afb. 7.** Verschuif de katheter tot de hoeveelheid in het venster verschijnt voor gecontroleerde uitzuiging in de diepte. **Afb. 8.** Voor alternatieve behandeling: Druk de zuigerknop in en roteer het MAP-verdeelstuk met gesloten uitzuiging tot de poort voor alternatieve therapie in het verlengde van de luchtweg ligt, open de afsluitcassette, breng het instrument in en voer de procedure uit. **Afb. 9.** Zorg ervoor dat het verdeelstuk van het gesloten uitzuigstelsel met multitoegangspoort in de 'off'-positie is gedraaid om de katheter te vervangen. **Afb. 10.** Koppel los door de vervangende katheter links om te draaien.

OPSTELLEN VAN HET GESLOTEN UITZUIGSYSTEEM

WERKWIJZE

UITZUIGEN:

1. Controleer of de uitzuigleiding werkt
2. Controleer of het verdeelstuk zich in de UITZUIG-positie bevindt
3. Sluit de roze flacon met zoutoplossing vooraf aan
4. Laat de sonde tot de gewenste diepte zakken
5. Druk het duimventiel minstens drie seconden in
6. Trek de uitzuigkatheter langzaam uit tot de zwarte markering op de schacht zichtbaar is
7. Verwijder de lege flacon met zoutoplossing en vergrendel het duimventiel
8. Na het uitzuigen moet het verdeelstuk in de UITZUIG- of NEUTRALE positie worden gezet (afhankelijk van het protocol van de afdeling)


Let op: indien het systeem direct na het uitzuigen opnieuw wordt gebruikt, hoeft u de positie van het verdeelstuk niet te veranderen

KATHETER VERVANGEN:

1. Zet het verdeelstuk in NEUTRALE positie door de knop in te drukken en te draaien tot u een 'klik' hoort
2. Koppel los door de vervangende katheter linksom te draaien
3. Vervang de katheter door een nieuwe katheter te plaatsen en rechtsom te draaien totdat deze goed is aangesloten
4. Zodra de procedure is voltooid, draait u het verdeelstuk in de UITZUIG-positie (afhankelijk van het protocol van de afdeling)

BRONCHIALE MONSTERS NEMEN:

1. Zet het verdeelstuk in de MONSTERNAME-positie door de knop in te drukken en te draaien tot u een 'klik' hoort
2. Open de afsluitcassette en smeer de bronchoscoop
3. Plaats de bronchoscoop, PDP of Mini-BAL
4. Zodra de procedure is voltooid, draait u het verdeelstuk in de UITZUIG- of NEUTRALE positie (afhankelijk van het protocol van de afdeling)
5. Verwijder en vervang de gebruikte afsluitcassette

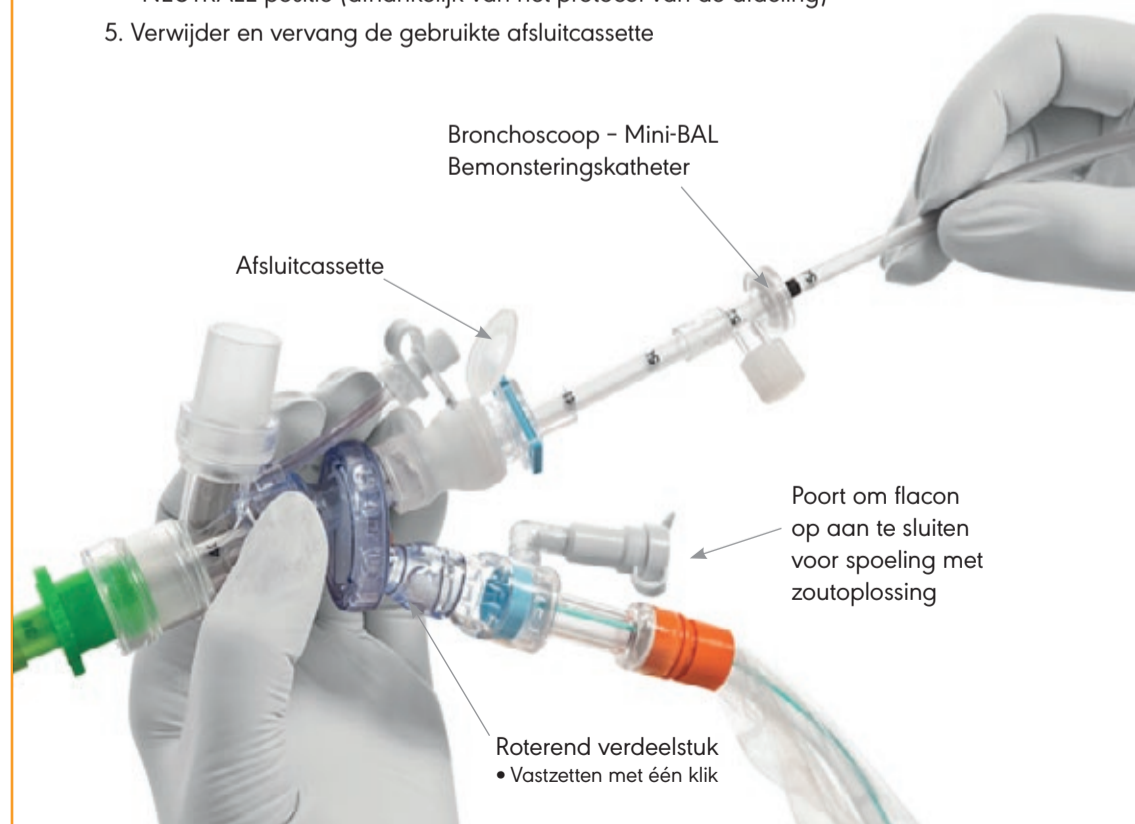

WERKWIJZE

BIJ UITZUIGEN/KATHETER VERVANGEN/BRONCHIALE MONSTERS NEMEN

AVANOS

Stuur voor meer informatie een e-mail aan
customerservice.bnl@avanos.com of ga naar www.avanos.nl.